

Utilisation du test INSTI™



1

Identifier le test INSTI

Piquer le **doigt propre** du patient et former une **grosse goutte** de sang suspendue



2

Recueillir la première goutte de sang avec la **pipette verticale sans presser la poire**.

Former une **nouvelle goutte de sang** et la recueillir en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte

Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le **trait noir** de la pipette



3

Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le **flacon 1**

Fermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions.



4


Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane

Répéter l'opération avec le **flacon 2**

Une fois le contenu du flacon 2 absorbé, vider le contenu du **flacon 3**

LECTURE / INTERPRÉTATION

Un point

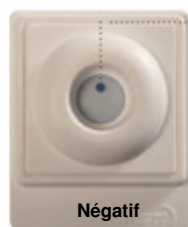

Contrôle



Négatif

Deux points



Contrôle



Test



Positif

Lire immédiatement le résultat du test

Les points peuvent avoir une intensité de couleur différente



Phone: +41 79 347 13 22
Email: info@win-test.ch