

TEST INSTI HIV 1/2

Réalisé en une minute - résultat immédiat

Instructions à lire avant la 1^{ère} manipulation du test

Conservation des tests INSTI à une température comprise entre + 15 à +30° C.

Réalisation des tests pouvant aller jusqu'à 42° C.

Nécessité d'utiliser des gants de protection lors de la manipulation.

Procédure de réalisation des tests :

Tous les tests doivent être utilisés dès l'ouverture de l'emballage

LANCETTE

Avec le doigt suivre le bord de l'emballage afin de sentir l'encoche où il faut déchirer. Enlever le bouchon transparent, placer la lancette côté rouge contre le doigt et presser.

TEST INSTI :

Déchirer à l'endroit de l'encoche en écartant de chaque côté.

Placer la membrane INSTI avec le rebord blanc en bas.

PRELEVEMENT :

Utiliser la pipette de prélèvement en la tenant horizontalement dans la GROSSE goutte de sang sans toucher le doigt et SANS PRESSER SUR L'EMBOÛT

Prélever le sang jusqu'au trait noir sans prise d'air.

Presser sur la pipette pour mettre le sang dans le flacon 1.

Homogénéiser chaque flacon avant de les verser délicatement dans le puits.

Attendre la filtration totale de chaque échantillon à travers la membrane avant de passer à l'étape suivante.

Tout point même légèrement apparent est considéré comme un positif

Ne pas lire les résultats plus de 5 minutes après la fin de réalisation du test.

Les 2 points apparents sur la membrane peuvent être d'intensité différente :
2 points bleus = positif - 1 point bleu = négatif



Rue du village, 8
CH-1195 Bursinel
Suisse

Tél. +41 21 824 37 00
Fax. +41 21 824 37 01
Mob. +41 79 347 13 22

Email: info@win-test.ch
Site: www.win-test.ch